


**Anleitung zur Abnahme und dem Versand von Corona-Abstrichen mit „cobas® Dual Swab Sample Packet“**

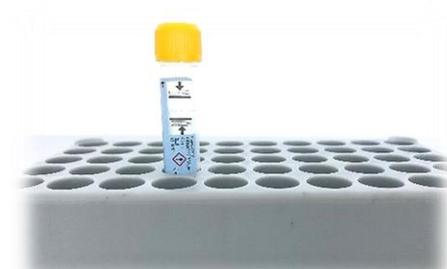

Bitte beachten Sie das Verfallsdatum auf der Packung.

Stellen Sie das Röhrchen mit dem Transportmedium in ein Probenrack und schrauben Sie den Deckel ab. Ein Probenrack können Sie bei Bedarf im Labor bestellen.



Wählen Sie je nach Entnahmestort den passenden Abstrichtupfer.

Nach Entnahme des Abstrichs stecken Sie den Tupfer in das Röhrchen und brechen Sie den oberen Teil des Schafts über den Rand des Röhrchens an der schwarz markierten Sollbruchstelle ab. Es ist hilfreich, das Röhrchen dabei mit der anderen Hand festzuhalten.



Anschließend den Deckel bitte fest aufschrauben, sodass die Flüssigkeit nicht auslaufen kann! Das mit den Patientendaten beschriftete Röhrchen wird zusammen mit dem Auftragschein erst in einen Probenbeutel (durchsichtig) danach in den Probenbeutel mit der Aufschrift "Corona" gepackt.

