

**Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Probenabnahme:**

- Vor der Probenabnahme sollten Patienten eine Stunde nichts essen oder trinken bzw. Babys nicht gestillt werden.
- Nehmen Sie bitte pro Person **ein** Abstrichröhrchen und beschriften dieses mit Name, Vorname und Geburtsdatum. Verwenden Sie bitte nur die Abstrichröhrchen, die dieser Anleitung beiliegen.
- Zur Entnahme der Wangenschleimhautabstriche reiben Sie bitte kräftig mit dem Tupfer über die linke und rechte Wangeninnenseite der Mundhöhle (je ca. 15 Sekunden).
- Überführen Sie bitte den Tupfer sofort in das entsprechende Röhrchen.
- Die Proben bitte bis zum Transport gekühlt aufbewahren und auf dem üblichen Transportweg ins Labor schicken.