

Liebes Praxispersonal,

zur Vereinfachung des Transports von Proben aus Sammelurinbehältern und zur Vermeidung von unnötigem Abfall, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Bitte beachten Sie folgende Punkte bei der **Einsendung von Sammelurin** ins Labor:

- Urinmenge an der Skala auf dem Sammelurinbehälter ablesen **und auf dem Anforderungsschein vermerken.**
- Gut verschlossenen Behälter leicht schwenken, um eine gute Durchmischung des Sammelurins zu erreichen.
- Mit der Urinmonovette 10 mL Urin aus dem Sammelurinbehälter entnehmen.
- Die Handhabung der Urinmonovette entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der Rückseite.
- Die Urinmonovette **beschriften bzw. mit einer Nummer versehen** und mit Anforderungsschein umgehend ins Labor einsenden. Ist eine sofortige Einsendung nicht möglich, bitte die Urinmonovette im Kühlschrank lagern.
- Den Urinsammelbehälter **NICHT** zurück ins Labor senden! Den Rest des Sammelurins bitte in der Toilette entsorgen.

Die Sammelflasche kann nach gründlichem Ausspülen mit Wasser und Trocknen wiederverwendet werden.

Aufkleberetiketten und Säurebehälter zur Ansäuerung von Sammelurin können im Labor angefordert werden.


Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Laborteam vom Bioscientia MVZ Labor Karlsruhe


# Urin-Monovette®

## Handhabungshinweis

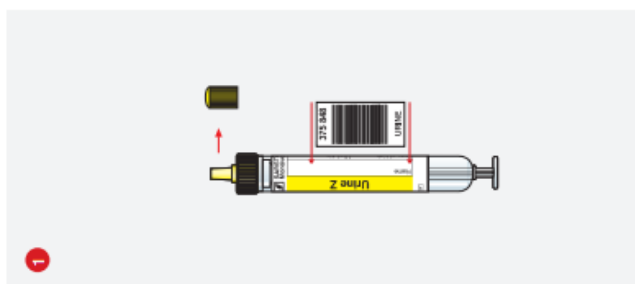


1

Barcode-Etikett entlang der Linie bzw. **exakt senkrecht** kleben. **Stopfen entfernen und aufbewahren!**

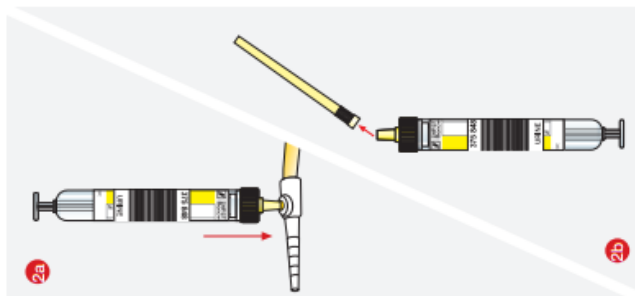


2a

Urinentnahme aus dem Katheter.\* **Membran gemäß den internen Richtlinien desinfizieren.** **Membran mit der Luerspitze durchstoßen.** Die Saugspitze aufsetzen.

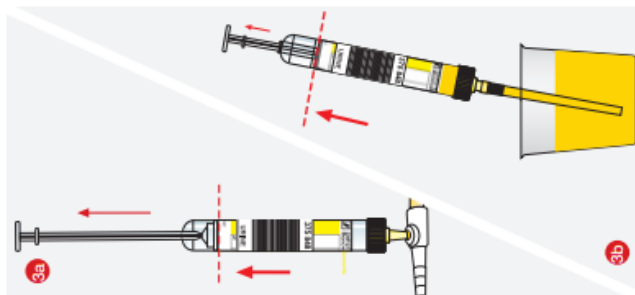


3b

Die Saugspitze ins Gefäß eintauchen und die **Urin-Monovette® bis zur Basis-Linie aufziehen.**

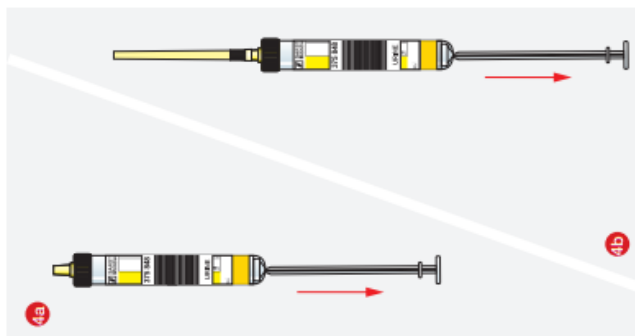

4b

Die **Urin-Monovette® senkrecht** halten und die **Kolbenstange bis zum Anschlag nach unten ziehen**, um die Saugspitze zu entleeren.

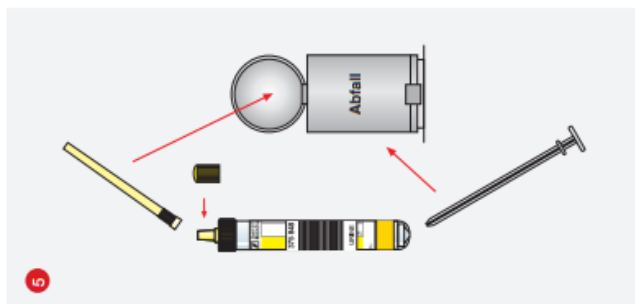

5

Die Saugspitze abziehen und die **Kolbenstange abknicken**, beides entsorgen. Den **Stopfen wieder aufsetzen.**

SARSTEDT AG & Co. KG  
Postfach 12 20 · D-51682 Nümbrecht  
Telefon +49 22 93 305-0  
Telefax +49 22 93 305-3450  
**Service 0800 (Deutschland)**  
Telefon (0800) 0 83 305-0  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com



Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die nicht in jedem Land verfügbar sind. Technische Änderungen vorbehalten.