

Herpes simplex-Virus Typ 1/2

Direktnachweis mittels Immunfluoreszenztest

Hinweise zur **Probennahme**:

- Überschuss an Schleim, Exsudat bzw. Bläschenflüssigkeit mit **dickem Tupfer** entfernen oder für die Bakterienkultur verwenden
- ausreichend **Epithelzellen** aus verdächtiger Läsion (z. B. Bläschengrund) mit **dünnem Abstrichtupfer** aufnehmen
- Tupfer auf der dafür vorgesehenen **Auftragsstelle** des **Objektträgers abrollen**
- Ausstrich gut **lufttrocknen** lassen
- in den **Objektträgerbehälter** einbringen, beschriften und in das Labor einsenden