



# Speicheldiagnostik

## Probenentnahmematerial

- 1 zuckerfreies Kaugummi
- 1 kalibriertes Schraubdeckelröhrchen
- 1 Begleitschein
- 1 frankierter Rückumschlag (Versandtasche für freigestellte medizinische Proben)

## Probenentnahme

- Zur Ermittlung des aktuellen Kariesrisikos werden ca. 5 mL einer stimulierten Speichelprobe benötigt.
- Der Patient sollte möglichst aufrecht und entspannt sitzen und 1 Std. vor Probenentnahme weder Nahrung noch Nikotin zu sich genommen haben.
- Das vom Labor mitgelieferte, zuckerfreie Kaugummi wird 30 sec. gekaut und der gesammelte Speichel verworfen.
- Unter weiterem Kauen des Kaugummis wird der Speichel im Schraubdeckelröhrchen etwa 5 min. gesammelt. In Abhängigkeit von der Speichelsekretionsrate kann die Sammelzeit verkürzt oder verlängert werden.
- Das gut verschlossene und beschriftete Schraubdeckelröhrchen wird zusammen mit dem vollständig ausgefüllten Überweisungsschein an das Labor versandt. Die Probe sollte bis zum Transport kühl gelagert werden.
- Bitte die Sammelzeit auf dem Überweisungsschein eintragen

## Kosten der Untersuchung

Kariesprofil ohne Hefepilze: auf Anfrage

Kariesprofil mit Hefepilze: auf Anfrage

## Dauer der Untersuchung

4 - 5 Tage