



QuantiFERON®-TB Gold Plus im Teströhrchen für die Bestimmung der T-Zell spezifischen Immunantwort Tuberkulose

1. Bitte alle vier Röhrchen mit Namen, Entnahmedatum und Uhrzeit beschriften und mit 0,8 - 1,2 mL Blut (schwarze Markierung am Röhrchen) befüllen.
2. Proben durch 10-maliges vorsichtiges Schwenken mischen.
3. Bitte das Blut spätestens 16 Stunden nach Abnahme bei 37 °C 16 - 24 Stunden inkubieren und dann 15 Minuten bei 2.000 - 3.000 x g zentrifugieren. Danach können die Proben bis zur Weiterleitung an das Labor bei 2 - 8 °C gelagert werden.
4. Falls Sie keinen Brutschrank zur Verfügung haben, die Proben bitte nach der Blutentnahme **unverzüglich bei Raumtemperatur an das Labor schicken.**

Auf keinen Fall dürfen die Proben gekühlt werden!

Eine genaue Beschreibung liegt den Röhrchen bei.

Ansprechpartner im Labor:

Dr. med. Dirk Alber: 0721 6277-522

Dr. med. Katharina Brodner 0721 6277-534



Materialbegleitschein:

Bitte unbedingt ausfüllen und mit dem Probenset zurückschicken!

Praxis _____

Patient _____

Entnahme

Datum _____

Uhrzeit _____

Bebrütung
in der Praxis
(siehe 3.)

Ja

von Datum _____

Uhrzeit _____

bis Datum _____

Uhrzeit _____

Nein